



 easyglic

EASYTH!NGS

A EASYTH!NGS é uma empresa voltada ao desenvolvimento de produtos ou coisas que facilitem o dia-a-dia das pessoas.

A nossa energia vem da vontade de pesquisar e desenvolver produtos que resolvam problemas cuja solução não é encontrada facilmente.

Assim, esperamos que este produto venha facilitar sua vida!

ESTE É O EASYGLIC, SEU COMPANHEIRO NO DIA A DIA.



O EASYGLIC é composto por um gabinete em plástico e uma pulseira em borracha. Esperamos que ele lhe seja confortável ao uso.

Na parte inferior você poderá observar que existem seis pontos de contato, cuja função descreveremos mais à frente neste manual.

CARREGADOR:



Juntamente com o EASYGLIC, estamos lhe fornecendo um carregador utilizado exclusivamente para o recarregamento da bateria do seu dispositivo.

Observe a posição correta do encaixe do EASYGLIC.

Você pode inserir em qualquer porta USB (disponíveis no carregador de celular, computadores, etc.)




O EASYGLIC deve ser utilizado sempre em conjunto com o aplicativo fornecido pela EASYTHINGS.

O aplicativo está disponível no Google Play e deverá ser baixado e instalado em seu smartphone.

CARREGAMENTO:

Antes de iniciar o uso do EASYGLIC você deverá recarregar a bateria. Para tanto, observe o procedimento a seguir:

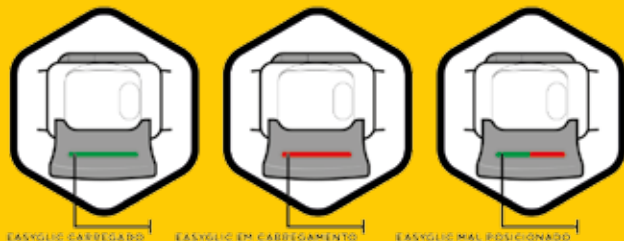

O recarregamento da bateria dura aproximadamente duas horas. Observe se o sinal luminoso do carregador está verde. Isso indicará que a bateria está completamente carregada.

ALERTAS:

*Se o EASYGLIC não estiver com os contatos devidamente posicionados no carregador, as luzes aparecerão nas cores vermelha e verde.

*Se o EASYGLIC estiver com os contatos corretamente posicionados, as luzes permanecerão completamente na cor vermelha, se estiver no estado de carregamento e verde, caso esteja carregado.

CONEXÃO MOBILE:

Antes de iniciar o uso você deverá parear o EASYGLIC com seu smartphone. Verifique nas configurações se o bluetooth do seu smartphone está ativo. Caso o EASYGLIC esteja carregado e o bluetooth esteja ativo ele deverá aparecer na lista de dispositivos disponíveis para pareamento. Caso o EASYGLIC não esteja na lista, proceda a uma busca.




Enquanto o procedimento de pareamento está sendo realizado, você observará o sinal luminoso do EASYGLIC piscando em AZUL VIBRANTE por 5 segundos.

Ao final do procedimento, verifique se o EASYGLIC consta na lista de dispositivos pareados. Caso contrário, repita o procedimento.

POSICIONAMENTO NO PULSO:

Para funcionar adequadamente, o EASYGLIC deverá estar sempre bem ajustado ao pulso.

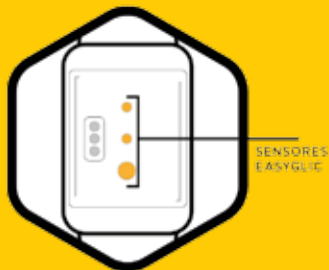

Os sensores que são os três pontos de contato mostrados na figura acima, devem estar permanentemente em contato com a pele, caso contrário, o EASYGLIC não funcionará adequadamente.

Sugere-se a limpeza da área com álcool antes do uso. Se a área do pulso onde o EASYGLIC será colocado tiver abundância de pelos, sugerimos que seja feita depilação para garantir o funcionamento adequado do EASYGLIC.

ALERTAS LUMINOSOS E VIBRACIONAIS:

Seu EASYGLIC emite sinais luminosos e vibracionais.



Vermelho - indica um possível estado de hipoglicemia (acompanhado de vibração).



Amarelo - indica um estado de atenção (pode acender espontaneamente também).

Se o sinal luminoso acender continuamente na **cor VERMELHA**, acompanhado de vibração, indica que um possível evento de hipoglicemia está se aproximando. Para interromper o alerta, toque no botão.



Verde - indica um estado normal.

O alerta ficará ativo por **45 segundos**. Caso não seja interrompido e o pareamento com o smartphone esteja ativo, será enviado alerta para os contatos de emergência.



SINAL DE BATERIA

Se o sinal luminoso acender continuamente na cor **AZUL CLARO** por 3 segundos indica que a bateria tem carga plena.

Se o sinal luminoso acender intermitentemente (piscando) na cor **AZUL CLARO** indica que a bateria necessita ser recarregada.



Quando abrir o aplicativo no seu smartphone observe se ele está emparelhado com o EASYGLIC. Caso não esteja reveja o procedimento de conexão mobile.

Na guia de **CONTATOS**, você poderá cadastrar até três contatos de emergência do seu smartphone para receberem comunicados caso o usuário não desarme o alarme. Esses contatos deverão estar clientes de que poderão receber uma mensagem sua em casos de emergência. Para cadastrar um contato, basta tocar no sinal de + e selecionar o contato desejado em sua agenda.



Na guia **CONTROLE DE GLICEMIA**, você deverá registrar todas as medições de glicemia que realizar. Este registro é **MUITO IMPORTANTE** para a calibração do EASYGLIC e melhoria no seu desempenho.

Os alertas gerados serão listados na guia **ALERTAS**. Solicitamos que nos comunique os casos em que o alerta foi acionado sem que você tenha sentido indício de hipoglicemia.

